

Aktuálně nabízíme tyto **antigenové testy pro SARS-COV 2 testování se službami viz níže:**

1. LEPU AG25 LEPU SARS-Cov-2 Antigen Detection Kit

jednoduchý, bezbolestný a neinvazivní odběr vzorku,

výtěrem ze spodní přístupné části nosu

balení se nedají jednoduše rozdělit po 1ks

provedení- video určené pro rakouské školáky

<https://www.youtube.com/watch?v=sxTTWtncrEg>

cena od 129Kč/1 test, DPH 0%= dočasně zrušena, standard balení á 25 testů za 3225 Kč

Velmi jednoduché použití, neinvazivní odběr

Provedení testu:
Výtěrovým tamponem proveďte výtěr z nosu do hloubky cca 2,5 cm, na tamponu musí zůstat materiál – hlen.
Tampon vložte do prolisu v kazetě
Zakapejte puřrem, tampon několikrát otočte.
Odstraňte krytí lepítka, zavřete tak aby se reakční proužek dotýkal tamponu, **slepte a pevně přitlačte** k sobě
Po 15 minutách odečtěte výsledek
Po použití zlikvidujte jako potenciální biologicky nebezpečný odpad

Interpretace výsledku

Pozitivní (+) **Negativní (-)**

Neplatný

6 kapek + pozor na rozlití při otevírání
Tamponem otáčet

2. NG AG 25 NEWGENE Coronavirus Antigen Detection Kit

jednoduchý, bezbolestný a neinvazivní odběr vzorku, DUÁLNÍ- UNIKÁTNÍ

ze slin s příměsí sputa nebo výtěrem z dutiny ústní resp. spodní přístupné části nosu

balení se dají jednoduše rozdělit po 1ks

cena od 159Kč/1 test, DPH 0%= dočasně zrušena, standard balení á 25 testů za 3795 Kč,

video pro provedení- použití:


<http://www.medesa.cz/nezarazene/newgene-coronavirus-detection-kit/>

manipulovat se soupravou, pečlivě si vydezinfikujte ruce.

- Do odběrového sáčku **oberete vzorek slin a hlenu, a/nebo provedte stěr z úst** (z jazyka a horního patra) **či kraje nosu** (použijte tyčinku, která je součástí balení a kruhivým pohybem, z hloubky max 2,5cm odeberte vzorek z obou nosních dírek)



z úst a nosu:

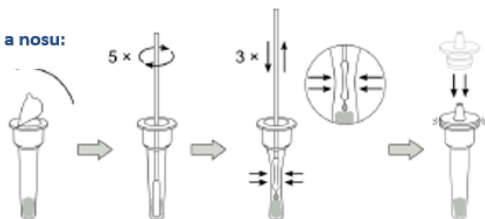

Odběr slin a hlenu:



- STĚR:** tyčinku se vzorkem po stěru umístěte do zkumavky s extrakčním puřrem.
- Přes stěnu zkumavky sevřete prsty tyčinku a pomalu ji vytahujte ze zkumavky tak, abyste vymáčkali veřkerý vzorek z tyčinky do extrakčního puřru. **Extrakční zkumavku spolu s roztokem uzavřete a dobře protřepejte.**
- SLINY:** Pokud provedete pouze odběr vzorku slin, použijte pro přenos vzorku do extrakční zkumavky **pipetku**.

3. AG 20 NINGBO SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test saliva

Extrémně jednoduchý, bezbolestný a neinvazivní odběr vzorku, ze slin s příměsí sputa, bez jakékoliv další manipulace-samoobslužné, balení se dají jednoduše rozdělit po 1ks

cena od 349Kč/1 test, DPH 0%= dočasně zrušena, standard balení á 20 testů za 6980 Kč

- Ponořte kazetu do kelímku se vzorkem, nechte vzorek, aby se **do kazety nasál**. Kazetou můžete v kelímku pohybovat, ideálně krouživými pohyby, abyste usnadnili nasátí vzorku. Postup vzorku kazetou je možné **pozorovat v kontrolním okénku pod reakčními sloty**.
- Jakmile vzorek dostatečně prostoupí do kazety (viditelný postup vzorku v kontrolním okénku), vyčkejte 15 min, do kompletního proběhnutí reakce.



4. RE AG 20 Novel Realy Cov 2 Antigen Detection Kit saliva

jednoduchý, bezbolestný a neinvazivní odběr vzorku,

ze slin s příměsí sputa

balení se dají jednoduše rozdělit po 1ks

cena od 159Kč/1 test, DPH 0%= dočasně zrušena, standard balení á 20 testů za 3180 Kč

- Do odběrového **kelímku oberete vzorek slin a hlenu**.
- Doporučujeme dbát na **přítomnost hlenu** ve vzorku. Vzorek osahující pouze sliny nemusí být dostačující pro získání relevantního výsledku testu.



- Kapátkem naberte vzorek slin (po rysku na kapátku) a přeneste **4 kapky slin** do extrakční zkumavky.
- **Odstříhnete** plastové vyústění **kapsle extrakčního pufru** a obsah přidejte ke vzorku slin v extrakční zkumavce. Extrakční zkumavku **uzavřete víčkem a protřepávejte 5 vteřin**.
- Z obalu **vyjměte testovací kazetu**, umístěte ji na vodorovnou plochu. Z extrakční zkumavky **ve svislé poloze nakapejte do otvoru na kazetě 3 kapky roztoku se vzorkem**.
- **Po 10 minutách odečtěte výsledek**.
- Po více než 20 minutách již výsledek neodečtěte.




Pozitivní



Negativní



Neplatný

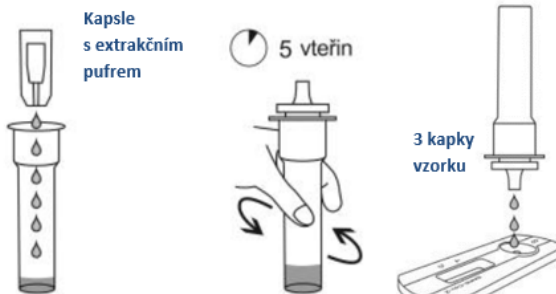

proč spolupracovat právě s námi:

- jsme dlouhodobě (25 let) ověřeni a registrovaní **profesionálové v laboratorních technologiích**
- dodáváme testy které **považujeme za kvalitní a i proveditelné laikem** tak aby výsledek byl **validní a užitečný**,
- dodáváme **testy kterým rozumíme, víme jak je udělat a jak interpretovat výsledek**, jak řešit problémy při testování, pro toto **jsme k dispozici i na telefonu**,


www.medesa.cz



- ke všem testům máme český návod i rozšířenou instrukci k použití (části u testů viz výše) a doporučení pro využití a interpretaci, -příklad-část



Pro usnadnění představy rozdílu mezi PCR testy, Ag testy a testy pro stanovení přítomnosti protilátek uvádíme názorný graf:

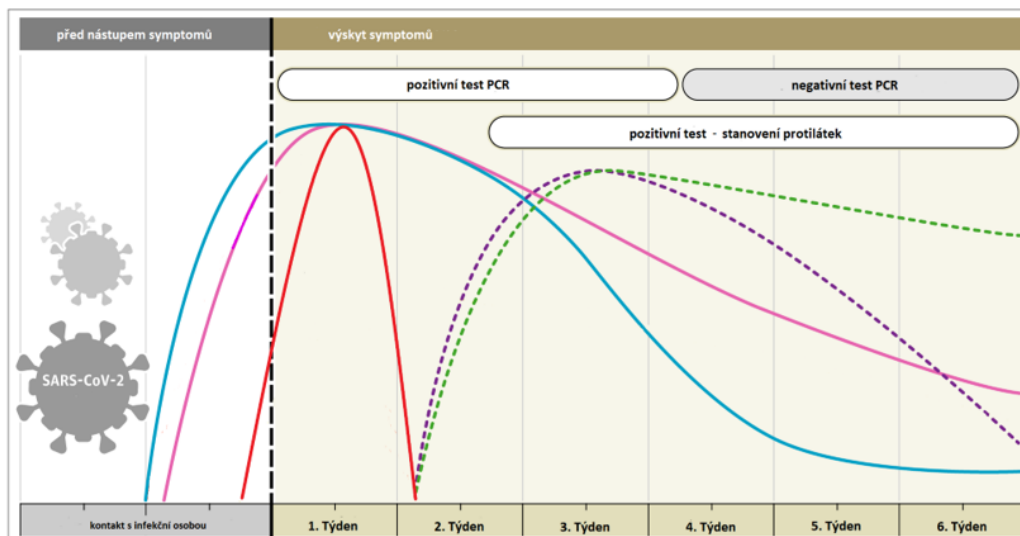

- jsme připraveni testy ukázat i předvést jak je správně provést
- dodáváme rychle a to testy které máme trvale skladem, bezodkladná expedice
- dodáváme jakékoliv množství, i jednotlivé testy, se všemi způsoby úhrady, na větší množství uděláme konkrétní nabídku
- všechny námi testy jsou nositeli výjimky pro samotestování a jsou v seznamu MZ ČR stejně tak i naše společnost MEDESA
- testy se všemi informacemi a podklady máme na webech a v e-shopech:
<http://www.medesa.cz/nezarazene/covid-19-testy/> <https://portal.medesa.cz/covid> zde zejména pro organizace a OSVČ, způsob úhrady převodem proti faktuře <https://shop.medesacare.cz/236-rapid-testy> pro veřejnost a ostatní, způsob úhrady platba kartou nebo i hotově na prodejně v Poličce

jednoduše objednávejte na: objednavky@medesa.cz; tel: +420 461 723 558,

předpokládané nejčastější využití antigenních testů

1. pro testování u všech zaměstnavatelů
2. pro samotestování široké populace, i opakované
3. pro testování ve zdravotnických a sociálních zařízeních a službách na otestování personálu a návštěv
4. pro testování u praktických i ostatních lékařů

V přílohách nebo na webu naleznete kompletní informační materiály

pro doplnění informací, dotazy a vše ostatní zůstávám k dispozici s úctou

Otakar Klepárník
 mobil: +420602108305, e-mail: otakar.kleparnik@medesa.cz

skupina **Medesa**

MEDESA www.medesa.cz MEDESA SK

MEDESACare www.medesacare.cz, Vermeiren ČR

www.medesa.cz

